



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



Аспіратор ДИТЯЧИЙ EcoBreath

XS

model



ArhiMED
innovation technologies

Ви придбали чудовий девайс!

- Цей прилад є абсолютно новим засобом для очищення носика дитини. Очищає носик м'яко, ефективно і легко. Він дуже простий у використанні.
- Аспіратор оснащений трьома рівнями сили всмоктування, які можна регулювати відповідно до потреби. Максимальна сила всмоктування є абсолютно безпечною для немовляти.
- На вибір є різна приємна музика, для спокою малюка. Завдяки їй діти сприймають процедуру, як гру і не бояться аспірації.
- Пластикові резервуари та силіконові насадки для всмоктування, виготовлені з харчових матеріалів, і є повністю безпечними та гігієнічними.

Техніка безпеки

- Цей виріб використовується лише для очищення носової порожнини немовляти/дитини.
- Не допускайте потрапляння в насадку твердих предметів розміром більше 2 мм
- Не допускайте ударів приладу (не кидайте прилад), щоб не пошкодити його.
- Використовуйте тільки аксесуари, надані виробником
- Цей виріб не є іграшкою. Будь ласка, зберігайте його в безпечному місці і не дозволяйте дітям гратися ним.

Запобіжні заходи перед використанням

Основа приладу (корпус) НЕ є водонепроникним.

Перед використанням рекомендується ретельно промити силіконові насадки та пластикові резервуари для збору слизу під струменем гарячої води.

При необхідності, для більш ретельної очистки, можна їх замочити в теплом мильному розчині на 10-15хв, після чого треба їх промити під гарячою водою та висушити (дати просохнути) перед встановленням на прилад.

Не використовуйте для дезинфекції силіконових насадок та пластикових резервуарів кип'ячу воду (окріп), так як вона може пошкодити їх.

Не занурюйте весь виріб у рідину, так як електронна частина приладу не є водонепроникною.

Якщо зовнішній корпус приладу забруднився, не занурюйте його у воду, просто протріть його.

ПОРАДА: Для кращої очистки носика дитини, перед початком процедури аспірації, рекомендується закапати ніс дитини сольовим розчином чи Хьюмером (або аналогами) і, через 1 хв після цього, починати процедуру.

Догляд за аспіратором

- Будь ласка, для очищення електронного корпусу прилада, використовуйте лише вологі тканини або серветки (можна на спиртовій основі)
- Насадки для всмоктування та контейнер для збору слизу можна дезінфікувати лише у теплому мильному розчині або у легкому спиртовому розчині
- Основний корпус виробу не є водонепроникним. Не мийте його під водою та не чистіть при високій температурі.
- Не зберігайте виріб під прямими сонячними променями та у надто вологому середовищі.
- Не використовуйте агресивні хімічні речовини для чищення цього виробу.

Будь ласка, уважно прочитайте перед використанням:

- ⚠ Під час використання переконайтеся, що рот дитини відкритий, щоб забезпечити циркуляцію повітря в носовій порожнині і уникнути дискомфорту.
- ⚠ Під час роботи назального аспіратора не перекривайте іншу ніздрю. Будь ласка, зверніть увагу на очищення насадок та резервуарів приладу перед кожним використанням.
- ⚠ Промивайте всмоктувальну силіконову насадку та прозорий пластиковий контейнер після використання.
- ⚠ Не занурюйте весь виріб у рідину, електронний блок приладу НЕ є водонепроникним
- ⚠ Коли рівень носового слизу у пластиковому резервуарі досягає половини, його слід очистити перед подальшим використанням, щоб запобігти всмоктуванню носового слизу в двигун приладу.

Параметри аспіратора

Product Name: ArhiMED Ecobreath

Product Model: XS

Working voltage: 3.7

Charging voltage: DC 5V 1A

Maximum power: 3.5W

Battery capacity: 600mAh


Product net weight: 150g

Product size: L207*W41.5*H49mm

Структура аспіратора



● Аксесуари

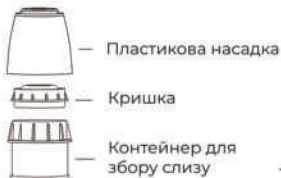

● Три змінні насадки



Насадка №1



Насадка №2

Насадки 1 або 2 використовуються для повсякденного проведення процедури дітям віком від 1 року (можна навіть і з народження, якщо розмір носика у малюка дозволяє). Обирайте ту насадку, якою Вам зручніше проводити процедуру. Це можна перевірити на практиці




Насадка №3

Насадка 3 спеціальної форми розроблена для новонароджених і може використовуватись з 0 міс + на повсякденній основі

Як правильно користуватися приладом:

- Увімкнення/вимкнення: натисніть кнопку ⑦, щоб увімкнути пристрій, і натисніть ще раз, щоб вимкнути пристрій після завершення процедури;
- Регулювання сили всмоктування: Натисніть кнопку ⑧, щоб встановити інтенсивність всмоктування (від 1 до 3)
- Увімкніть музику: Натисніть кнопку ⑨ для програвання мелодії, і натисніть ще раз, щоб вимкнути музику
- Старт всмоктування: натисніть кнопку ⑩, щоб почати всмоктування для очищення носової порожнини, і натисніть ще раз, щоб вимкнути всмоктування;
- Зарядка пристрою: Підключіть пристрій до USB-роз'єму для зарядки від джерела постійного струму 5 В 1 А,

Усунення несправностей

-  Якщо виникають наступні проблеми, будь ласка, дотримуйтесь "Посібника з усунення несправностей". Якщо ви не можете їх вирішити самостійно, зверніться до відділу турботи ArhiMED.

Проблема	Вирішення
Погано всмоктує	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте, щоб силіконові насадки були щільно встановлені2. Перевірте, щоб пластиковий прозорий контейнер був щільно встановлений3. Перевірте, чи не заблокований (забитий) вентиляційний та всмоктувальний отвір на самому приладі
Пристрій не вмикається	Будь ласка, зарядіть достатньо перед використанням


Як правильно робити процедуру?




Закріпіть контейнер для збору слизу разом з верхньою кришкою в основному корпусі пристрою. Поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб затягнути



Зафіксуйте пластикову насадку контейнера для збору в основному корпусі і поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб затягнути.

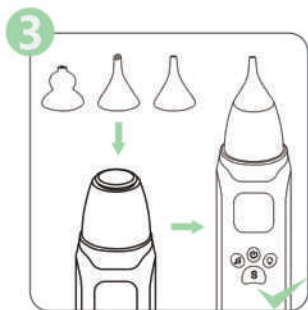

Виберіть потрібну силіконову насадку та встановіть її на збірний стакан.

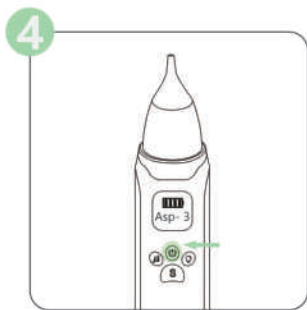


Натисніть кнопку живлення (увімкнення), щоб запустити пристрій.

5



Налаштуйте потрібний режим (силу всмоктування) від 1 до 3. Здебільшого, зручно користуватися саме 3-м режимом для швидкого очищення

6

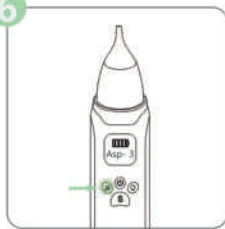

Натисніть кнопку відтворення музики, щоб почати програвання мелодії. Ця функція є необов'язковою. Гарна музика може привернути увагу дитини і полегшити процес очищення носика.

7




Натисніть кнопку «S» всмоктування, щоб почати всмоктування.

8



Помістіть кінчик силіконової насадки в носову порожнину малюка. М'якими круговими рухами зберіть слиз. Не притискайте дуже щільно кінчик насадки до стінки носика, так як це може завадити всмоктуванню. Для кращого результату, тримайте кінчик насадки «поверхнево» на відстані 0.5-1мм від стінки носика.

Належне користування

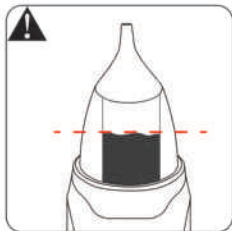

Примітка: При очищенні носика, коли вміст слизу в контейнері для збору перевищує половину об'єму, будь ласка, вийміть контейнер для збору та очистіть його перед подальшим використанням, інакше це легко призведе до потраплення рідини у середину прилада, що може призвести до поломки.



Порада: Будь ласка, НЕ використовуйте окріп або пару для дезінфекції всмоктувальних насадок і чаші для збору. Їх можна мити під гарячою проточною водою температурою не більше 70 градусів. Або у посудомийній машині (макс. 70 градусів)



Примітка: Основна частина виробу не є водонепроникною. Не промивайте водою і не чистіть при високій температурі. Будь ласка, використовуйте м'який вологий рушник або вологу спиртову серветку для очищення корпусу.



Порада: Після використання, будь ласка, вчасно очистіть всмоктувальну насадку та контейнер гарячою водою, щоб запобігти розмноженню бактерій. Дозволяється замочувати у мильному розчині.

Гарантія

⚠ Гарантійний термін виробу починається з дати покупки.

Гарантія втрачає силу у випадках:

- Використання приладу з порушенням вимог до експлуатації;
- При пошкодженні в результаті умисних або помилкових дій споживача;
- Наявності механічних або інших ушкоджень виробу;
- Проникнення рідини, пилу, комах та інших сторонніх предметів всередину виробу;
- Розбирання або будь-якого іншого стороннього втручання в конструкцію приладу.

⚠ Гарантія не поширюється на недоліки (несправності) виробу, спричинені наступними причинами:


- Природним зносом частин, що мають обмежений термін служби;
- Дією непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь та ін.).

Якщо у Вас є будь які питання по роботі приладу,
або раптом щось не виходить -
скоріше звертайтеся у відділ турботи ArHiMED:



або



 **+38 (073) 853 38 51**

підтримка, сервіс, гарантія

Безконтактні термометри **ArhiMED EcoTherm**

ДІЗНАЙСЯ ТЕМПЕРАТУРУ ЗА **1** СЕКУНДУ

• Точно • Швидко • Універсально

