



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



Аспіратор
ДИТЯЧИЙ

ArhiMED
EcoBreath

SE

model



1 ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

Дякуємо, що обрали ArhiMED! Цей прилад розроблений для швидкого, безпечного та ефективного видалення слизу з носової порожнини дітей з перших днів життя.

2 КОМПЛЕКТАЦІЯ

Перевірте наявність усіх компонентів перед використанням:

- 1** Основний блок — 1 шт.
- 2** Аспіраційний резервуар для слизу — 1 шт.
- 3** Силіконова насадка (Вузька)— 1 шт. (для рідких виділень).

4 Силіконова насадка (Універсальна) — 1 шт. (для густіших виділень).

5 Змінні фільтри (поролонові) — 5 шт.

6 Кабель для зарядки (Micro-USB) — 1 шт.

7 Інструкція користувача — 1 шт.



3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель	EcoBreath SE
Гарантія	12 місяців
Живлення	Акумулятор (вбудований) 400 mAh

Режими роботи	5 режимів
Час повної зарядки	~ 2 години
Макс. тиск вакууму	100кПа
Рівень шуму	40 дБ — низький рівень шуму
Матеріал наконечників	М'який медичний силікон
Умови експлуатації	+10°C...+40°C, вологість ≤85%

4 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ



УВАГА! Недотримання цих правил може призвести до травмування або поломки приладу.

Протипоказання до використання:

- Носові кровотечі.
- Гострі травми голови, обличчя або шиї.
- Порушення згортання крові.
- Наявність відкритих ран або запалень у носовій порожнині.

Правила безпеки:

 **ЗАБОРОНЕНО** перевертати прилад, коли в резервуарі є рідина. Слиз може потрапити в мотор, що призведе до виходу з ладу (не гарантійний випадок).

 **ЗАБОРОНЕНО** занурювати основний блок (мотор) у воду.

Використовуйте прилад тільки за призначенням (очищення носа).

Зберігайте у недоступному для дітей місці. Прилад містить дрібні деталі.

Не використовуйте прилад без сіліконової насадки.

5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Зарядка: Перед першим використанням повністю зарядіть прилад (приблизно 2 години).

 Червоний індикатор — йде зарядка.

 Зелений індикатор — прилад заряджено.

Збірка: Переконайтеся, що фільтр встановлено на вході в моторний блок.

- **Приєднайте резервуар** до корпусу (до щільної фіксації).

- **Встановіть силіконовий наконечник:** Вузький — для рідкого слизу, Універсальний — для глибокого очищення.

6 ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

1: Зволоження (Важливо!)

Якщо слиз густий або сухий, обов'язково закапайте в ніс дитині фізрозчин (сольовий розчин) за 2–5 хвилин до процедури. Це критично для ефективності.

2: Процедура:

1 Натисніть кнопку живлення та утримуйте її 1 секунду, щоб увімкнути прилад.

2 Обережно піднесіть наконечник до носового отвору малюка. Не потрібно вводити його глибоко! Насадка має щільно, але м'яко контактувати з краєм носика, для створення вакууму.

3 Тривалість безперервного всмоктування — кілька секунд. Робіть паузи.

4: Завершення

Вимкніть прилад, натиснувши кнопку живлення.

7 ОЧИЩЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА ФІЛЬТРИ

Після кожного використання:

1 Від'єднайте верхню частину (наконечник та резервуар).

2 Промийте силіконові наконечники та резервуар теплою водою з милом.

Фільтр:

Вийміть поролоновий фільтр. **1**



- **Рекомендуємо** замінювати фільтр після кожної процедури для максимальної гігієни.

Дезінфекція (раз на тиждень):

- Силіконові наконечники: Можна кип'ятити (не більше 30 сек) або обробляти антисептиком (Хлоргексидин).
- Резервуар (пластик): Промивати гарячою водою (не окропом), обробляти антисептиком.
- Моторний блок: Протирати лише злегка вологою серветкою.

8

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНО-
СТЕЙ

Проблема	Причина	Рішення
Прилад не вмикається	1. Розряджений акумулятор. 2. Кнопка натиснута недостатньо довго.	Зарядіть прилад.
Слабке всмоктування	1. Нещільне прилягання компонентів. 2. Забитий або мокрий фільтр. 3. Густий слиз.	1. Перевірте збірку резервуара. 2. Замініть фільтр на сухий. 3. Використайте фізрозчин для розрідження.
Рідина потрапила в корпус	Перевертання приладу, відсутність фільтра.	НЕ ВМИКАТИ! Висушіть прилад (мінімум 24 години). Якщо не працює — зверніться в сервіс.
Сильний шум / вібрація	Резервуар встановлено неправильно.	Розберіть та зберіть прилад заново.

9 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін гарантії: 12 місяців з дати покупки.

Гарантія не поширюється на випадки:

- Механічні пошкодження (падіння, удари).
- Потрапляння рідини всередину моторного блоку (недотримання інструкції).
- Самостійний ремонт або розбирання корпусу.
- Природний знос витратних матеріалів (фільтри, насадки).

Якщо в тебе є будь-які питання щодо роботи приладу, або раптом щось не виходить скоріше дзвони або пиши нам у:



Viber

або



Telegram

+38 (073) 853 38 51

Підтримка, Сервіс, Гарантія