



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



Аспіратор
ДИТЯЧИЙ

ArhiMED
EcoBreath

XS

model



1 ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

Дякуємо, що обрали ArhiMED!

Електричний аспіратор EcoBreath XS розроблений для зручного, практичного та ефективного очищення носових ходів у дітей від 0 місяців. Оснащений музичною функцією для комфорту малюка під час процедури.

2 КОМПЛЕКТАЦІЯ

Перевірте наявність усіх компонентів перед використанням:

- 1 Аспіратор ArhiMED EcoBreath XS — 1 шт.
- 2 Силіконова насадка №1 (діти від 18 міс.) — 1 шт.
- 3 Силіконова насадка №2 (немовлята, 6–18 міс.) — 1 шт.
- 4 Силіконова насадка №3 (новонароджені, 0–6 міс.) — 1 шт.
- 5 Контейнер для збору слизу — 1 шт.
- 6 USB-кабель для зарядки — 1 шт.
- 7 Інструкція з використання — 1 шт.


3 БУДОВА ПРИЛАДУ




● Аксесуари



● Три змінні насадки

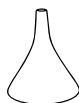

Насадка №1

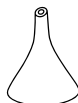

Насадка №2

Насадки 1 або 2 використовуються для повсякденного проведення процедури дітям віком від 1 року (можна навіть і з народження, якщо розмір носика у малюка дозволяє). Обирайте ту насадку, якою Вам зручніше проводити процедуру. Це можна перевірити на практиці



Насадка №3

Насадка 3 спеціальної форми розроблена для новонароджених і може використовуватись з 0 міс + на повсякденній основі

Параметр	Значення
Модель	EcoBreath XS
Робоча напруга	3,7 В
Напруга зарядки	DC 5V / 1A
Ємність батареї	600 мАг
Час зарядки	~1,5–2 години
Час роботи	~30–40 хвилин
Рівні всмоктування	3 рівні
Рівень шуму	< 35 дБ
Гарантія	12 місяців

БЕЗПЕКА — ПРОЧИТАЙТЕ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Уважно прочитайте цей розділ перед першим використанням. Недотримання може призвести до травми дитини.

Прилад призначений виключно для очищення носових ходів у дітей **від 0 місяців** під наглядом дорослих.

Протипоказання до використання:

- Кровотеча з носа (навіть незначна)
- Травма або операція на носі / носових пазухах
- Середній отит (запалення вуха) у гострій фазі
- Поліпи в носі
- Алергічна реакція із набряком слизової
- Температура тіла вище 39°C
- Ознаки сильного стресу або збудження

Якщо ви не впевнені — проконсультуйтеся з педіатром перед використанням.

Правила безпеки:

- **ЗАБОРОНЕНО** вводити насадку глибше ніж на 1–1,5 см у носовий хід.
- **ЗАБОРОНЕНО** занурювати основний корпус у воду — він не є водонепроникним.
- **ЗАБОРОНЕНО** використовувати під час зарядки.
- **ЗАБОРОНЕНО** використовувати пошкоджені насадки (тріщини, розриви).


- Використовуйте **тільки оригінальні насадки ArhiMED**
- Не залишайте дитину без нагляду під час процедури
- Не допускайте ударів по приладу та не кидайте його
- Зберігайте подалі від дітей, коли не використовується
- Не використовуйте прилад без силіконової насадки
- Не допускайте сильних ударів або падіння приладу

У разі виникнення будь-якого дискомфорту або болю у дитини — негайно припиніть використання та зверніться до лікаря.

6 ПЕРША ЗАРЯДКА

Перед першим використанням повністю зарядіть прилад.

- Підключіть USB-кабель до роз'єму на корпусі
- Підключіть другий кінець до зарядного пристрою 5V/1A або комп'ютера

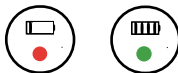

 Індикатор **блимає** — триває заряджання

 Індикатор **горить постійно** — заряджено повністю

Час повної зарядки: **~1,5–2 години** . Після зарядки відключіть кабель.

Не залишайте прилад на зарядці довше **3 годин**.
Не заряджайте від пошкодженого кабелю.

7

ПІДГОТОВКА ДО ПРОЦЕДУРИ

Для кращого результату закапайте **2-3 краплі** фізіологічного розчину (NaCl 0,9%) або спрею на основі морської води в кожную ніздрю. Зачекайте **1-2 хвилини** — це розріджує слиз.

Положення дитини:


- Лежачи на спині або сидячи на руках у дорослого
- Голова дитини злегка нахилена назад
- Дорослий надійно тримає голову дитини вільною рукою

8

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ


Крок 1. Збирання приладу

Приєднайте контейнер для збору слизу до корпусу. Поверніть за годинниковою стрілкою до клацання.

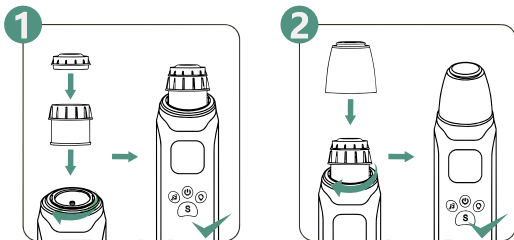

Крок 2. Вибір насадки

Насадка	Вік дитини
№1 — найменша	0–6 місяців
№2 — середня	6–18 місяців
№3 — найбільша	від 18 місяців

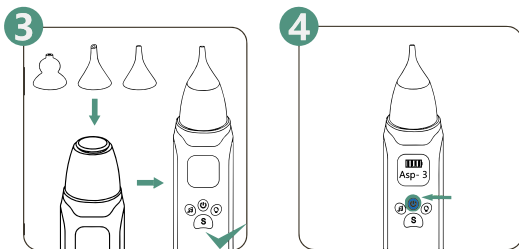

Встановіть насадку на контейнер і зафіксуйте.

Крок 3. Увімкнення

Натисніть кнопку живлення **1 раз** — пролунає звуковий сигнал.

Крок 4. Вибір рівня потужності

Натискайте кнопку  для вибору рівня:

ASP 1 Мінімальне всмоктування — для новонароджених та першого застосування

ASP 2 Середнє всмоктування — стандарт для більшості ситуацій

ASP 3 Максимальне всмоктування — для густого слизу від 18 місяців

Завжди починайте з **Рівня 1**, щоб дитина звикла до відчуттів.

Крок 5. Підготовка дитини

Попросіть дитину відкрити рот і дихати ротом — це покращує циркуляцію повітря і підвищує ефективність процедури.

Крок 6. Аспірація

- Обережно введіть кінчик насадки в ніздрю на **0,5–1,5 см** (не більше) та натисніть кнопку **S** для початку аспірації
- Тримайте насадку під кутом **45°**, не прямо
- Утримуйте не більше **3–5 секунд** в одній ніздрі
- Вийміть насадку, дайте дитині подихати **10–15 секунд**
- Повторіть для другої ніздрі

Крок 7. Вимкнення

Натисніть і утримуйте кнопку живлення **2 секунди**.

Крок 8. Очищення

Від'єднайте контейнер і насадку, промийте теплою водою одразу після використання.

9

МУЗИЧНА ФУНКЦІЯ

Прилад оснащено вбудованим програвачем мелодій для відволікання дитини під час процедури:

Натисніть кнопку  для увімкнення або вимкнення музики

Повторне натискання — перехід до наступної мелодії

Після кожного використання:

- 1 Від'єднайте насадку та контейнер від корпусу
- 2 Промийте теплою проточною водою (не вище 70°C)
- 3 За потреби замочіть у мильному розчині на 10–15 хвилин
- 4 Ретельно промийте та дайте повністю висохнути
- 5 Протріть корпус вологою серветкою (

Дезінфекція (1–2 рази на тиждень):

- **Силіконові насадки:** Замочіть у теплом мильному або слабкому спиртовому розчині на 15–20 хвилин. Ретельно промийте та висушіть.
- **Контейнер (пластик):** Промивати гарячою водою (не окропом), обробляти антисептиком.
- **Корпус приладу:** Протирати лише злегка вологою серветкою. Не занурювати у воду!



Заборонено: кип'ятити та стерилізувати в кип'ятку; використовувати агресивні хімічні засоби; мити в посудомийній машині.

Заміна насадок: Замінюйте силіконові насадки кожні **3–4 місяці** або при появі тріщин, деформацій чи помутніння. Оригінальні насадки можна придбати окремо.

Умови зберігання:

- Зберігайте у сухому, чистому місці
- Температура зберігання: від +5°C до +40°C
- Не залишайте під прямим сонячним промінням
- Не зберігайте у вологих приміщеннях
- Після зберігання понад 1 місяць — перезарядіть перед використанням
- Зберігайте в оригінальній упаковці
- Зберігайте у недоступному для дітей місці

11

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Погане всмоктування	Насадка не щільно закріплена	Перевірте фіксацію
Погане всмоктування	Контейнер не щільно закритий	Щільно закрийте контейнер
Погане всмоктування	Насадка забилася	Промийте насадку
Прилад не вмикається	Розряджена батарея	Зарядіть прилад
Рідина потрапила в корпус	Контейнер переповнений	НЕ ВМИКАТИ! Зверніться в сервіс
Слабке всмоктування	Низький заряд	Зарядіть прилад
Музика не відтворюється	Вимкнено звук	Натисніть кнопку 

Гарантійний термін: 12 місяців з дати покупки.

Гарантія діє при:

- Виробничих дефектах матеріалів або збірки
- Несправності електронних компонентів за умови нормальної експлуатації

Гарантія не поширюється на:

- Пошкодження внаслідок неправильного використання або недотримання інструкції
- Механічні пошкодження (тріщини, удари, падіння)
- Потрапляння рідини в корпус
- Природне зношення насадок та контейнера
- Несанкціонований ремонт або розбирання
- Дія непередбаченої сили (аварія, повінь, пожежа тощо)

Для гарантійного обслуговування збережіть чек або підтвердження покупки.

**Якщо в тебе є будь-які питання щодо роботи приладу,
або раптом щось не виходить
скоріше дзвони або пиши нам у:**



Viber

або



Telegram

+38 (073) 853 38 51

Підтримка, Сервіс, Гарантія